

Si el dolor de rodilla por osteoartritis (OA) no le deja avanzar, pida a su médico un tratamiento que

FUNCIONE DE 2 MANERAS PARA PERMITIRLE SEGUIR MOVIÉNDOSE¹⁻⁴



LUBRICA Y
AMORTIGUA¹⁻³

REDUCE LA
INFLAMACIÓN
Y EL DOLOR¹⁻⁴

**COBERTURA DEL 100 % EN MEDICARE
PARTE B* SIN RESTRICCIONES**

*Es posible que se apliquen gastos de bolsillo. Consulte a su médico.

INDICACIONES

EUFLEXXA (hialuronato de sodio 1 %) se usa para aliviar el dolor de rodillas debido a la osteoartritis. Se utiliza para los pacientes que no reciben suficiente alivio con los analgésicos simples, como el acetaminofeno, o con hacer ejercicio y fisioterapia.

EUFLEXXA es únicamente para inyectar en la rodilla, por un médico u otro profesional de atención médica calificado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No use este producto si ha tenido alguna reacción alérgica a EUFLEXXA o a productos con ácido hialurónico anteriormente.

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN LA CONTRATAPA Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.

¿Cómo puedo tratar el dolor de rodilla por OA?

La OA de rodilla es una afección bastante frecuente. Aunque no existe una cura, la buena noticia es que existen varias opciones de tratamiento que pueden ayudar a aliviar el dolor y maximizar el funcionamiento de la rodilla⁵.

~37% DE LOS ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS SE VEN AFECTADOS POR OA DE RODILLA ⁶

Tratamientos

Analgésicos de venta libre o de venta con receta^{3,7-9}

Ventajas ✓ Ayudan a aliviar el dolor

Desventajas ✗ El alivio solo dura poco tiempo

Inyecciones de corticosteroides^{3,7-9}

Ventajas ✓ Ayudan a aliviar el dolor

Desventajas ✗ Pueden tener efectos secundarios como dolor, rigidez e hinchazón de la articulación

✗ Pueden provocar una mayor degradación del cartílago

Inyecciones de ácido hialurónico (AH)^{3,7-9}

Ventajas ✓ Ayudan a reducir el dolor y la inflamación y mejorar la función

✓ Complicaciones mínimas

Desventajas ✗ Algunas inyecciones de AH pueden causar más hinchazón de la articulación

¿Qué diferencia a las inyecciones de AH de otros tratamientos?

El AH se encuentra de forma natural en todo el cuerpo, especialmente en la articulación de la rodilla. El AH sano tiene un alto peso molecular y una estructura lineal. Funciona con el líquido natural de la rodilla para amortiguar y lubricar la rodilla, de modo que pueda soportar las exigencias de la vida diaria. Lamentablemente, el AH de la rodilla puede disminuir y descomponerse con el tiempo, lo que puede provocar OA de la rodilla. Esto puede causar un aumento del dolor, la hinchazón y las lesiones. Aquí es donde las inyecciones de AH pueden ayudar^{3,10,11}.

Su médico administra inyecciones de AH directamente en la rodilla, pero no todos los AH son iguales. Las inyecciones de AH de alto peso molecular y una estructura lineal pueden proporcionar beneficios adicionales^{4,11}.

LA REPETICIÓN DE LAS INYECCIONES CON AH DE ALTO PESO MOLECULAR PUEDE AYUDAR A MEJORAR LA FORMA EN QUE EL AH DE LOS LÍQUIDOS SINOVIALES SE MUEVE POR TODA LA RODILLA, Y DE ESTA MANERA MEJORAR LA CAPACIDAD DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA PARA FABRICAR SU PROPIO AH¹²⁻¹⁴

Los AH lineales de alto peso molecular pueden proporcionar^{4,11}:

BENEFICIOS FÍSICOS

Brindan lubricación

Aumentan la amortiguación de choques

BENEFICIOS CELULARES

Reducen la inflamación y el dolor

Ayudan a proteger el cartílago y a disminuir el desgaste en el futuro

Ayudan al cuerpo a producir más de su propio AH elaborado de forma natural

LOS ESTUDIOS CLÍNICOS HAN DEMOSTRADO QUE EL USO DE INYECCIONES DE AH EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA OA DE RODILLA PUEDE AYUDAR A REDUCIR SUS SÍNTOMAS¹⁵

¿En qué se diferencia EUFLEXXA?

EUFLEXXA es la inyección de AH más recetada que puede ayudarle a disfrutar de los momentos importantes al tratar su dolor de rodilla por OA de dos maneras^{1-4,15}.



LUBRICA Y AMORTIGUA¹⁻³

Ayuda a aumentar la amortiguación de choques



REDUCE LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR¹⁻⁴

Protege el cartílago

Ayuda a producir el AH natural que se encuentra en el organismo

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

- No debe hacerse inyectar EUFLEXXA en la rodilla si tiene una infección en la articulación de la rodilla o enfermedades dérmicas o infecciones alrededor del lugar de la inyección.
- EUFLEXXA no se ha probado en mujeres embarazadas, mujeres que se encuentran en período de lactancia ni en niños menores de 18 años. Después de que reciba la inyección EUFLEXXA debe evitar realizar actividades físicas durante 48 horas, como trotar, jugar al tenis, levantar objetos pesados o estar de pie durante mucho tiempo (más de una hora corrida).

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN LA CONTRATAPA Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.

ACERCA DE EUFLEXXA



EUFLEXXA SE PARECE MUCHO
AL AH NATURAL Y SALUDABLE DE LA RODILLA ^{1,11,16-20}

AH natural y saludable



EUFLEXXA

euflexxa[®]
1% SODIUM HYALURONATE
dual-acting
expect more

¿Qué resultados ha obtenido EUFLEXXA en pacientes con OA de rodilla?

En un ensayo clínico de 12 semanas, los pacientes experimentaron^{1,21}:


Alivio poderoso del dolor

El alivio del dolor comenzó ya 1 semana después de la primera inyección y siguió mejorando después de cada una

1


SEMANA DESPUÉS

1.ª INYECCIÓN
(n = 160)

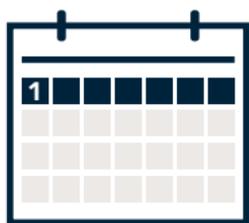


↓ 19%

2.ª INYECCIÓN
(n = 159)

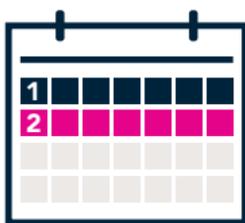

↓ 37%

3.ª INYECCIÓN
(n = 159)

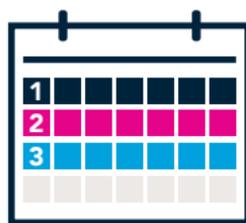

↓ 48%

CAMBIO MEDIO (%) DESDE EL INICIO EN LA PUNTUACIÓN DE DOLOR WOMAC

10

SEMANAS DESPUÉS

↓ 55%

Synvisc

3.ª INYECCIÓN (n = 158)

62% ↓

EUFLEXXA

3.ª INYECCIÓN (n = 157)

Ambos tratamientos mostraron mejoras significativas con respecto al inicio ($P < 0.0001$)^{1,21}.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

- Los eventos adversos más frecuentes relacionados con las inyecciones EUFLEXXA fueron dolor articular, dolor de espalda, dolor en las extremidades, dolor muscular e hinchazón en las articulaciones.
- No use este producto si ha tenido alguna reacción alérgica a EUFLEXXA o a productos con ácido hialurónico anteriormente.

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN LA CONTRATAPA Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.



**CASI 2/3 DE LOS PACIENTES NO TENÍAN DOLOR
AL FINAL DEL ESTUDIO DE 12 SEMANAS²¹**

∨ **CERCA
DE 3 VECES MENOS**

Se necesitan menos analgésicos²¹

Los pacientes tratados con EUFLEXXA necesitaron menos analgésicos en comparación con los pacientes tratados con otra inyección de AH

∧ **81%**

Mayor satisfacción²¹

Los pacientes tratados con EUFLEXXA estaban satisfechos con el alivio del dolor que experimentaban

EVENTOS ADVERSOS

Los eventos adversos más frecuentes en el ensayo clínico incluyen dolor articular (11/160), aumento de la presión arterial (3/160), hinchazón en las articulaciones (3/160), sensación de malestar (3/160), hormigueo (2/160), dolor de espalda (1/160), náuseas (1/160), irritación de la piel (1/160) y sensibilidad en la rodilla en estudio (1/160)^{1,21}.

*Sobre la base de la reducción del porcentaje en la puntuación del dolor en la escala Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) desde el inicio en un ensayo esencial de 12 semanas de EUFLEXXA (n = 157) frente a Synvisc (n = 158). La ausencia de dolor se define como ausencia de síntomas para las 5 preguntas sobre el dolor de WOMAC (con puntuaciones medias en la escala visual analógica [EVA] de <20 mm).

¿Qué puedo esperar durante el tratamiento con EUFLEXXA?

Cómo comenzar

Debido a que el tratamiento con EUFLEXXA consta de **3 inyecciones durante 3 semanas consecutivas (1 ciclo)**, programar cada cita con su médico es un excelente punto de partida¹.

Lleve un registro de sus citas haciendo lo siguiente:

- ✓ Configurar recordatorios en su teléfono móvil
- ✓ Escribir cada cita en su calendario
- ✓ Programar citas el mismo día de la semana

RECUERDE QUE ACUDIR A CADA CITA ES CLAVE PARA MAXIMIZAR EL ALIVIO DEL DOLOR DE RODILLA POR OA

Durante el tratamiento

El alivio del dolor puede comenzar tan solo una semana después de su primera inyección y continuar mejorando después de cada inyección durante un máximo de 6 meses^{1,21}.

LOS ESTUDIOS CLÍNICOS HAN DEMOSTRADO QUE RECIBIR LAS 3 INYECCIONES DE EUFLEXXA MEJORA EL ALIVIO DEL DOLOR QUE PUEDA TENER^{1,21}

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No debe hacerse inyectar EUFLEXXA en la rodilla si tiene una infección en la articulación de la rodilla o enfermedades dérmicas o infecciones alrededor del lugar de la inyección.
- EUFLEXXA no se ha probado en mujeres embarazadas, mujeres que se encuentran en período de lactancia ni en niños menores de 18 años. Después de que reciba la inyección EUFLEXXA debe evitar realizar actividades físicas durante 48 horas, como trotar, jugar al tenis, levantar objetos pesados o estar de pie durante mucho tiempo (más de una hora corrida).

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN LA CONTRATAPA Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.

¿Qué debo hacer después del tratamiento con EUFLEXXA?

Después de cada inyección

Es importante seguir estos 3 pasos¹:

1

Evite la actividad física durante 48 horas, incluso estar parado por más de 1 hora corrida.

2

Coloque hielo en la rodilla si tiene dolor o hinchazón leve. Si experimenta dolor articular, dolor de espalda, dolor en las extremidades/muscular o hinchazón en las articulaciones o si tiene algún otro problema, llame a su médico de inmediato

3

Pregúntele a su médico cuándo puede retomar con las actividades físicas principales.

Después de cada ciclo

Anticípese al dolor. Asegúrese de hacer un seguimiento con su médico 6 meses después de su tercera inyección para ver si es necesario repetir el tratamiento.

LA REPETICIÓN DEL TRATAMIENTO CON EUFLEXXA SE TOLERÓ BIEN DURANTE 6 MESES MÁS^{1,5,22}



Empecé a tener un alivio del dolor aproximadamente 6-8 semanas después de la inyección [1 ronda de EUFLEXXA], hasta que de repente me di cuenta de que no tenía dolor en la rodilla.

- Jan, paciente real de EUFLEXXA

Los resultados individuales pueden variar.

¿Está EUFLEXXA cubierto por mi seguro?

Cobertura EUFLEXXA

Tanto si tiene un seguro privado, como Medicare, o no cuenta con un seguro o su seguro es insuficiente, tiene opciones para el tratamiento con EUFLEXXA.

Medicare

*COBERTURA DEL **100 %** EN MEDICARE PARTE B* SIN RESTRICCIONES*

Seguro privado

La mayoría de los planes cubren EUFLEXXA. El consultorio de su médico comprobará sus beneficios si le han recetado el medicamento.

***~50 %** DE LOS PACIENTES CON SEGURO COMERCIAL PAGAN UN COPAGO DE \$0¹⁵*

Sin cobertura de seguro

El programa Patient Direct de EUFLEXXA[†] proporciona opciones de compra directa a los pacientes elegibles.

El pago se puede realizar a través de una cuenta de ahorro flexible, una cuenta de ahorro para la salud, una tarjeta de crédito o un cheque.

ENCUENTRE SU COBERTURA EN [EUFLEXXA.COM](https://www.euflexxa.com)

*Es posible que se apliquen gastos de bolsillo. Consulte a su médico.

[†]Debe tener 18 años o más y tener una receta válida para EUFLEXXA. Debe ser residente de los Estados Unidos o de los territorios de los EE. UU., excepto los residentes de Massachusetts, que no son elegibles para participar en este programa. No debe tener un seguro o solo un seguro comercial. Las personas que participan en cualquier programa de atención médica federal o estatal, que incluye, entre otros, Medicare, Medicaid, el programa de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos, TRICARE y cualquier programa de beneficios para empleados federal o estatal no son elegibles para participar en el programa. Se aplican términos y condiciones adicionales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

- Los eventos adversos más frecuentes relacionados con las inyecciones EUFLEXXA fueron dolor articular, dolor de espalda, dolor en las extremidades, dolor muscular e hinchazón en las articulaciones.
- No use este producto si ha tenido alguna reacción alérgica a EUFLEXXA o a productos con ácido hialurónico anteriormente.

CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE EN LA CONTRATAPA Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.

¿Ofrece EUFLEXXA programas de apoyo para ayudar con el tratamiento?

EUFLEXXA ofrece una amplia gama de apoyo para que pueda centrarse en lo que más importa: aliviar el dolor de rodilla por OA.

Programa de compromiso EUFLEXXA



Nos comprometemos a proporcionarle el tratamiento y la experiencia que las personas con OA de rodilla pueden esperar con EUFLEXXA. Por eso le ofrecemos un reembolso de hasta \$100 por sus costos de copago si no está satisfecho con el alivio del dolor de rodillas por OA, 10 semanas después de su última inyección.

Para calificar, debe haber recibido las 3 inyecciones (1 inyección por semana durante 3 semanas).

HASTA \$100 DE REEMBOLSO

VISITE WWW.EUFLEXXA.COM

**PARA CONOCER LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES ADICIONALES Y LOS
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD COMPLETOS**

No deje que el dolor de rodilla por OA le impida disfrutar de momentos que importan. Pídale a su médico que le recete

EUFLEXXA: la inyección de AH que funciona de 2 maneras¹⁻⁴



Lubrica y amortigua¹⁻³



Reduce la inflamación y el dolor¹⁻⁴

Demuestra resultados probados y un perfil de seguridad para tratar su OA de rodilla^{1,5,21,22}

Ofrece cobertura y opciones de apoyo a medida que avanza en el tratamiento

PREGUNTE A SU MÉDICO:

“¿ES EUFLEXXA, LA INYECCIÓN DE AH QUE FUNCIONA DE 2 FORMAS, ADECUADA PARA MÍ?”

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No use este producto si ha tenido alguna reacción alérgica a EUFLEXXA o a productos con ácido hialurónico anteriormente.
- No debe hacerse inyectar EUFLEXXA en la rodilla si tiene una infección en la articulación de la rodilla o enfermedades dérmicas o infecciones alrededor del lugar de la inyección.
- EUFLEXXA no se ha probado en mujeres embarazadas, mujeres que se encuentran en período de lactancia ni en niños menores de 18 años. Después de que reciba la inyección EUFLEXXA debe evitar realizar actividades físicas durante 48 horas, como trotar, jugar al tenis, levantar objetos pesados o estar de pie durante mucho tiempo (más de una hora carida).
- Los eventos adversos más frecuentes relacionados con las inyecciones EUFLEXXA fueron dolor articular, dolor de espalda, dolor en las extremidades, dolor muscular e hinchazón en las articulaciones.

CONSULTE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA EN LA SOLAPA.

Lo alentamos a que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite www.FDA.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

También puede comunicarse con Ferring Pharmaceuticals Inc. al 1-888-FERRING.

Referencias: 1. EUFLEXXA [prospecto]. Parsippany, NJ: Ferring Pharmaceuticals Inc. 2. Altman R, et al. Anti-inflammatory effects of intra-articular hyaluronic acid: a systematic review. *Cartilage*. 2019;10(1):43-52. 3. Altman RD, Manjoo A, Fierlinger A, et al. The mechanism of action for hyaluronic acid treatment in the osteoarthritic knee: a systematic review. *BMC Musculoskeletal Disorders*. 2015;16:321. 4. Yang C, Cao M, Liu H, et al. The high and low molecular weight forms of hyaluronan have distinct effects on CD44 clustering. *J Biol Chem*. 2012;287(51):43094-43107. 5. Altman RD, Rosen JE, Bloch DA, et al. A double-blind, randomized, saline-controlled study of the efficacy and safety of EUFLEXXA for treatment of painful osteoarthritis of the knee, with an open-label safety extension (the FLEXX Trial). *Semin Arthritis Rheum*. 2009;39(1):1-9. 6. Grace L, McAlindon T, Hawker G, et al. Symptom assessment in knee osteoarthritis needs to account for physical activity level. *Arthritis Rheumatol*. 2015;67(11):2897-2904. 7. Arroll B, Goodyear-Smith F. Corticosteroid injections for osteoarthritis of the knee: meta-analysis. *BMJ*. 2004;10(328):1-5. 8. Kompell A, Roemer F, Murakami A, et al. Intra-articular corticosteroid injections in the hip and knee: perhaps not as safe as we thought? *Radiology*. 2019;293:656-663. 9. Migliore A, Procopio S. Effectiveness and utility of hyaluronic acid in osteoarthritis. *Clin Cases Miner Bone Metab*. 2015;12(1):31-33. 10. Sirin D, Kaplan N, Yilmaz I, et al. The association between different molecular weights of hyaluronic acid and CHAD, HIF-1 α , COL2A1 expression in chondrocyte cultures. *Exp Ther Med*. 2018;15:4205-4212. 11. Nicholls M, et al. Rheological properties of commercially available hyaluronic acid products in the United States for the treatment of osteoarthritis knee pain. *Clin Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders*. 2018;11:1-5. 12. Smith MM, Ghosh P. The synthesis of hyaluronic acid by human synovial fibroblasts is influenced by the nature of the hyaluronate in the extracellular environment. *Rheumatol Int*. 1987;7(3):113-122. 13. Concoff A, Sancheti P, Niazi F, Shaw P, Rosen J. The efficacy of multiple versus single hyaluronic acid injections: a systemic review and meta-analysis. *BMC Musculoskeletal Disord*. 2017 Dec 21;18(1):542. doi:10.1186/s12891-017-1897-2. 14. Loknauth J, Driscoll KE, Bendele A, Niazi F, Liang A, Larsen CC. Viscosupplementation may preserve tibial cartilage and collagen in osteoarthritis: findings from a preclinical model of osteoarthritis. *J Exp Orthop*. 2020 May 31;7(1):39. doi:10.1186/s40634-020-00256-4. 15. Promedio de 12 meses consecutivos de los datos de reclamaciones de IQVIA basados en pacientes únicos (noviembre de 2021). 16. Orthovisc [prospecto]. Woburn, MA: Anika Therapeutics, Inc.; 2005. 17. Supartz [prospecto]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2012. 18. Gelsyn-3 [prospecto]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2016. 19. Hyalgan [prospecto]. Parsippany, NJ: Fidia Pharma USA Inc.; 2011. 20. Genvisc-850 [prospecto]. Doylestown, PA: OrthogenRx; 2016. 21. Kirchner M, Marshall D. A double-blind randomized controlled trial comparing alternate forms of high molecular weight hyaluronan for the treatment of osteoarthritis of the knee. *Osteoarthritis Cartilage*. 2006;14(2):154-162. 22. Altman RD, Rosen JE, Bloch DA, et al. Safety and efficacy of retreatment with a bioengineered hyaluronate for painful osteoarthritis of the knee: results of the open-label Extension Study of the FLEXX Trial. *Osteoarthritis Cartilage*. 2011;19(10):1169-1175.



FERRING y el logotipo de FERRING PHARMACEUTICALS son marcas comerciales de Ferring B.V. EUFLEXXA[®] es una marca comercial registrada de Ferring B.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2023 Ferring B.V. Todos los derechos reservados. US-EU-2400010

